

Gebruuchsanweisung

Steriles H.O.T. Einmalgefäß mit integriertem Quarzglas

REF 60566



Zweckbestimmung

Das sterile Einmalprodukt H.O.T. Einmalgefäß mit integriertem Quarzglas ermöglicht als Zubehör die Durchführung der H.O.T. (Hämatogene Oxidationstherapie) mit einem H.O.T. - Gerät.

Allgemeine Hinweise

Das Produkt darf nur von in die Durchführung der H.O.T. eingewiesenen Fachkräften verwendet werden. Bitte beachten Sie für die Durchführung der Therapie unbedingt die Gebrauchsanweisung des H.O.T. - Gerätes.

Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn:

- die Verpackung oder das Produkt beschädigt ist,
- das Haltbarkeitsdatum überschritten oder nicht lesbar ist.

Nur zur Einmalverwendung bestimmt – eine Wiederverwendung oder Aufbereitung ist nicht zulässig.

Lagerbedingungen

Vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagern bei Temperaturen zwischen 10 °C und 40 °C.

Öffnen der Sterilverpackung

Beachten Sie die allgemeinen Hygienevorschriften für den Umgang mit sterilen Medizinprodukten.

Öffnen Sie die Sterilverpackung an der Eingriffsflasche vorne, indem Sie den bedruckten Teil des Beutels abziehen. Entnehmen Sie das H.O.T. Gefäß mit dem eingesetzten Quarzglas nach oben zeigend.

Hinweise zur Verwendung

Das H.O.T. Einmalgefäß verfügt über zwei Schlauchanschlüsse unten und eine Öffnung oben, in die das Quarzglas eingesetzt wird, welches zum Schutz des UV-Strahlers vorgesehen ist. Der kurze Schlauch ist für die Zuleitung des Patientenbluts gedacht sowie nach Beendigung der Oxygenierung die Reinfusion in den Patienten mittels Transfusionsbesteck; der lange Schlauch für die Sauerstoffzufuhr.

Die Schläuche sind vor der Anwendung auf festen Sitz zu prüfen!

Der Einsatz eines Antikoagulans ist zwingend erforderlich, zum Beispiel Natrium Citrat!

Bei der Reinfusion in den Patienten ist zwingend ein Transfusionsbesteck mit Blutfilter zu verwenden!

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und den zuständigen lokalen Behörden unverzüglich zu melden.

Entsorgung

Für eine ordnungsgemäße Entsorgung befolgen Sie bitte die lokal geltenden Vorschriften!

Hersteller



Hänsler Medical GmbH

Nordring 8, 76473 Iffezheim, Deutschland

Tel.: +49 (0)7229 3046 0

Email: info@haensler-medical.com

Website: www.haensler-medical.com

